



SPLENDA®

RADIOFRECUENCIA + ULTRACAVITACIÓN
EN SIMULTANEO.



Une los beneficios de la Radiofrecuencia y de la Ultracavitación en un solo tratamiento, sumando y potenciando así los efectos de ambas terapias.

MEDITEA 

www.meditea.com

MEDITEA



SPLENDA®

RADIOFRECUENCIA + ULTRACAVITACIÓN EN SIMULTANEO

La tecnología exclusiva de su cabezal permite el tratamiento en simultáneo de Radiofrecuencia y Ultracavitación a través de un solo aplicador. También puede optarse por la aplicación alternada e independiente de cada una de sus terapias. En Radiofrecuencia trabaja con valores de 500 kHz, 800 kHz y 1050 kHz y una potencia de 115 W.

En la terapia de ultracavitación entrega una intensidad de 35 W.

La Radiofrecuencia y la Ultracavitación combinadas generan una lipólisis más efectiva. La Radiofrecuencia al mismo tiempo aumenta la circulación en la zona tratada lo que favorece la rápida eliminación de las sustancias de desecho.



SPLENDA®



El equipo se encuentra especialmente indicado para el tratamiento de:

Patologías estructurales de la piel

- Estrías y flaccidez
- Arrugas, envejecimiento de la piel
- Cicatrices
- Paniculopatía edemato-fibro-esclerótica (celulitis)
- Adiposidades localizadas
- Post Liposucción

Traumatología y Rehabilitación

- Procesos inflamatorios
- Dolores musculares diversos
- Contracturas
- Relajación muscular



SPLENDA®





● Radiofrecuencia

La RF es una terapia ampliamente usada en el campo de la estética principalmente por su efecto sobre el tejido conectivo dérmico. Esta técnica produce un efecto a corto y largo plazo. En el inmediato la radiofrecuencia tensa las fibras de colágeno existentes, otorgándole mayor firmeza al tejido cutáneo. En el mediano plazo la radiofrecuencia desencadena la neocolagenogénesis en el tejido, es decir, promueve la formación de nuevas fibras de colágeno en la piel. Así ambos efectos reafirman y rejuvenecen la piel.

La radiofrecuencia es también efectiva en el tratamiento de celulitis y adiposidades. Diversos estudios demuestran que esta técnica produce cambios en la membrana celular del adipocito, que pueden llevar incluso a su ruptura. Además produce un aumento circulatorio, que favorece el drenaje de la linfa y la oxigenación de los tejidos.

● Ultracavitación

La Ultracavitación es una terapia que basa su acción en la aplicación de ultrasonidos de alta potencia y gran poder de penetración. Las ondas ultrasónicas, por medio de los cambios de presión, generan una gran cantidad de microburbujas que implosionan liberando esta energía en el espacio intersticial dentro del pánículo adiposo. Así, la membrana de los adipositos se rompe y libera sus depósitos en formas de ácidos grasos y glicerol que luego serán metabolizados por el organismo.

De este modo la Ultracavitación se convierte en una revolucionaria técnica que trata efectivamente las lipodistrofias y celulitis, entre otras.



ULTRACAVITACIÓN RADIOFRECUENCIA




SPLENDA® dispone de 2 cabezales aplicadores ergonómicos de distintos tamaños para ser usados según se aplique en zona facial o corporal. El aplicador facial está diseñado para el tratamiento por RF tetrapolar, mientras que el aplicador corporal permite el tratamiento por Radiofrecuencia multipolar y Ultracavitación, tanto de manera simultánea como independiente.



Cabezal Corporal
Radiofrecuencia
multipolar y
Ultracavitación



Cabezal Facial
RF tetrapolar

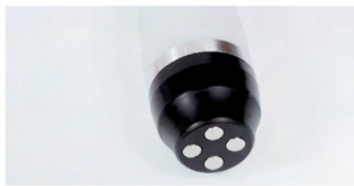

SPLENDA®





SPLENDA®

RADIOFRECUENCIA + ULTRACAVITACIÓN
EN SIMULTANEO

MEDITEA 

www.meditea.com

Une los beneficios de la Radiofrecuencia y de la Ultracavitación en un solo tratamiento, sumando y potenciando así los efectos de ambas terapias.



Nuestros equipos son fabricados bajo estrictas normas, asegurando la calidad.